

Suma[®] Med Enzyme

Milt enzymbaserat maskindiskmedel

Produktbeskrivning

Suma Med Enzyme är ett milt enzymbaserat maskindiskmedel speciellt formulerat för känsligt operationsgods. Produkten kan även användas till handdisk. Suma Med Enzyme löser effektivt smuts på operationsgods i mjuka och medelhårda vatten.

Produktegenskaper

Suma Med Enzyme är ett milt enzymbaserat maskindiskmedel som passar alla typer av disk. Produkten löser effektivt smuts på operationsgods, anestesi- och endoskoputrustning. Produkten innehåller enzymet Protolas vilket effektivt löser smuts och beläggningar i mjuka och medelhårda vatten.

Produktfördelar

- Löser effektivt smuts och intorkat blod
- Koncentrerad produkt ger låg användarkostnad
- Enzymer ger extra skonsam rengöring av pH-känsliga material

Bruksanvisning

Suma Med Enzyme doseras normalt med automatisk doseringsutrustning 2-6 ml/L. Doseras vid 20-25 C.

Koppla dunken till doseringsautomaten/doseringsslangen som sedan automatiskt doserar rätt mängd. Lokala förhållanden avgör den exakta doseringsmängden. Produkten är avsedd att doseras samtidigt med vattenintag, men kan även doseras senare.

Produkten kan även doseras manuellt. Vid handdisk doseras 5-7 ml/lit vatten. Vid manuell dosering ska skyddsglasögon och handskar användas (PVC, nitril, latex eller neoprene).

Teknisk information

Utseende:	Klar ljusgul vätska
pH (1% lösning):	8.5
Densitet (20 °C):	1.13

Ovanstående data är typiska värden och gäller inte som specifikation.

Skyddsföreskrifter och lagring

För fullständig information om hantering och förvaring hänvisas till säkerhetsdatablad. Förvara i originalförpackning. Undvik extrema temperaturer.

Att beakta

Om produkten används enligt bruksanvisning kan Suma Med Enzyme användas på dom flesta vanligen förekommande material inom sjukvården.

Förpackningsstorlekar

Förpackningsstorlek
20 L
2 x 5 L
200 L

